

CEFALY[®]

Behandlung und Prävention von Migräne

Traitement et prévention de la migraine



Was ist CEFALY®?

Qu'est-ce que le CEFALY®?

CEFALY® ist eine zertifizierte **medikamentenfreie** Migränebehandlung, die deine Lebensqualität verbessert und dich von Migräneschmerzen befreien kann. Dieser **externe Stimulator des Nervus trigeminus** (e-TNS) ist einfach anzuwenden, nicht verschreibungspflichtig und hilft, **akute Migräneanfälle** schnell zu lindern, **zukünftigen Anfällen vorzubeugen** und die Anzahl deiner Migränetage zu reduzieren.

CEFALY® wird unter bestimmten Bedingungen von der Krankenkassen Grundversicherung zurückerstattet.

*CEFALY® est un traitement certifié **sans médicament** contre la migraine qui peut améliorer ta qualité de vie et apaiser les douleurs causées par la migraine.*

*Ce **stimulateur externe du nerf trijumeau** (e-TNS) est facile à utiliser, disponible sans ordonnance et aide à **soulager** rapidement les crises de migraine aiguës, à **prévenir** les futures crises et à réduire le nombre de jours de migraine.*

CEFALY® est remboursé par l'assurance maladie de base sous certaines conditions.



Mehr Informationen
Plus d'informations



Ein Gerät, zwei Einstellungen

Un appareil, deux réglages

01

Acute Program

ist für die Behandlung von **akuten Migräneanfällen** geeignet und wird als einstündige Sitzung während des Migräneanfalls angewendet, um die Attacke zu stoppen und die Kopfschmerzen zu lindern.

*est indiqué pour le traitement des **crises de migraine**. Il doit être utilisé pendant 1 heure durant la crise pour l'arrêter ou pour diminuer la douleur.*

02

Prevent Program

ist zur **Vorbeugung von Migräneanfällen** konzipiert. CEFALY® Prevent ist für Betroffene, die häufig unter Migräne leiden und eine Migräneprophylaxe benötigen. Es sollte einmal täglich für 20 Minuten angewendet werden, um die Häufigkeit von Migräneattacken längerfristig zu reduzieren.

est indiqué pour les patient-e-s migraineux-ses souffrant de crises de migraine fréquentes et qui ont besoin d'un traitement de fond. Il doit être utilisé une fois par jour pendant 20 minutes pour réduire la fréquence des crises de migraine.




Signifikante Ergebnisse

Des résultats significatifs

Die Wirksamkeit und Sicherheit von CEFALY® wurde in mehreren **klinischen Studien** in den USA und Europa nachgewiesen.

*L'efficacité et la sécurité du CEFALY® ont été démontrées par de nombreuses **études cliniques** en Europe et aux États-Unis.*

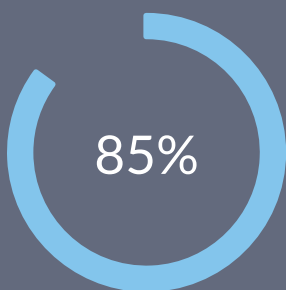

Nach einer einstündigen Sitzung mit der **Akutbehandlung** waren **32%** der Patienten schmerzfrei. **85%** sind von der Wirksamkeit des CEFALY® überzeugt.

*Après une heure d'utilisation du **programme de crise**, 32% des patient·e·s n'ont plus de douleur. 85% sont satisfait·e·s de l'efficacité du CEFALY®.*



Nach 3 Monaten täglicher 20-minütiger Sitzungen mit dem **Präventionsprogramm**, erlebten 3 von 4 Patienten eine Reduktion der Migränetage um **50%** oder mehr. Zudem nahmen sie durchschnittlich **75%** weniger der Menge an Medikamenten ein.

*Après 3 mois d'utilisation quotidienne du **programme de prévention**, 3 patient·e·s sur 4 observent une réduction de 50% ou plus des jours de migraines. La réduction de la consommation de médicaments antimigraineux est de 75% chez les patient·e·s répondeur·euse·s.*

Mehr Studien findest du unter <https://www.cefaly.ch>

Retrouve plus d'études sur <https://www.cefaly.ch>



Wie du CEFALY® testen kannst?

Comment tester CEFALY®?

CEFALY® kann während maximal **120 Tagen** unverbindlich getestet werden.

So gehst du vor:

CEFALY® peut être testé sans engagement jusqu'à **120 jours**.

Voici comment tu dois procéder:

- 01** Du kaufst das CEFALY® zum normalen Verkaufspreis von CHF 490.-
Tu achètes le CEFALY® au prix de vente normal de CHF 490.-
- 02** Du testest das CEFALY® während:
· 40 Tagen für **CHF 96.-**, 80 Tagen für **CHF 105.-** oder 120 Tagen für **CHF 114.-**
Tu testes le CEFALY® pendant:
· 40 jours pour **CHF 96.-**, 80 jours pour **CHF 105.-**, 120 jours pour **CHF 114.-**
- 03** Du behältst das CEFALY® und zahlst den kompletten Verkaufspreis von CHF 490.- **oder** du retournierst uns das CEFALY® und wir senden dir eine neue Rechnung für die Testphase zu. Wenn du das CEFALY® bereits bezahlt hast und es uns während des Testzeitraums zurückschickst, erstatten wir dir den Preis abzüglich der Testphase.
Tu gardes le CEFALY® et tu paies le prix de vente complet de CHF 490.- ou tu nous retournes le CEFALY® et nous t'envoyons une nouvelle facture pour la période d'essai. Si tu as déjà payé le CEFALY® et que tu nous le renvoies pendant la période d'essai, nous te remboursons son prix moins les frais d'essai.

Das CEFALY® Kit

Le kit CEFALY®

3 wiederverwendbare Elektroden
und wiederverschliessbare
Aufbewahrungstasche

3 électrodes réutilisables et leur
sac de rangement refermable

CEFALY® Enhanced

USB Kabel
Câble USB



Induktionsladegerät
Chargeur à induction



Handbuch
Manuel d'utilisation

Aufbewahrungsbox
Etui de rangement

CEFALY® c/o Neurolite AG

Hühnerhubelstrasse 79 | 3123 Belp

+41 31 529 28 32 | info@cefaly.ch

📷 @cefalyschweiz @cefalysuisse

www.cefaly.ch

