

# FLOW

NEUROSCIENCE



## Comprendre la dépression & la traiter efficacement

Fondé sur des preuves scientifiques • Effets perceptibles dès 3 semaines  
Bien toléré – sans effets secondaires significatifs • Essai à domicile pendant 30 jours

NEUROLITE

---

Advanced Medical Solutions

# Comprendre la dépression – la traiter de manière ciblée

**Doux. Ciblé. Scientifiquement fondé.**

## **Les neurosciences modernes démontrent**

**que :** La dépression n'affecte pas seulement les processus chimiques, mais aussi l'activité de certaines zones cérébrales – en particulier le cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC). Cette région contrôle notre humeur, notre motivation et notre équilibre émotionnel.

En cas de dépression, l'activité des neurones de cette région est réduite – ce qui peut entraîner les symptômes suivants :

- Tristesse persistante
- Perte de joie et d'intérêt
- Modifications du sommeil et de l'appétit
- Problèmes de concentration
- Épuisement et manque de motivation

Autrefois, on parlait d'un « déséquilibre chimique » dans le cerveau. Aujourd'hui, nous savons que **la dépression modifie aussi le fonctionnement global du cerveau** – et nécessite en conséquence un traitement ciblé.

Le casque Flow stimule en douceur le cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC) grâce à un faible courant continu (2 mA – environ la même intensité qu'une pile AA en veille). Ainsi, l'activité cérébrale saine est progressivement rétablie et les symptômes dépressifs sont atténués à la source.



# Flow est-il fait pour moi ?

**Un traitement doux contre la dépression – sans effets secondaires significatifs.**

Flow peut être un complément efficace et bien toléré dans le traitement de la dépression – même en association avec d'autres thérapies. Il s'agit d'une méthode non invasive sans effets secondaires significatifs, adaptée à de nombreuses personnes.

- Flow agit aussi en **complément** des antidépresseurs et peut en renforcer l'effet.
- **Sûr** – même en cas d'autres troubles psychiques ou physiques.
- Convient aux adultes diagnostiqués comme souffrant de **dépression légère à sévère**.

*Avant de commencer le traitement, il est recommandé de consulter votre médecin, surtout en cas de grossesse, de pathologies crâniennes, d'implants métalliques dans le crâne, d'épilepsie ou de problèmes cutanés au niveau du front.*

Vous n'avez rien à perdre – seulement à gagner en qualité de vie.

Flow peut être testé sans risque à peu de frais, est scientifiquement prouvé et facile à utiliser. Testez le casque pour CHF 98.– seulement pendant 30 jours – commandez-le simplement sur : [www.flowneuroscience.ch](http://www.flowneuroscience.ch)

Téléchargez ensuite l'application, qui vous guide pas à pas dans l'utilisation et accompagne le traitement. Ainsi, vous découvrirez facilement par vous-même si Flow vous convient.




**Téléchargez l'application gratuite.**

Connectez votre casque à votre téléphone via Bluetooth et lancez la stimulation.



# Rééquilibrez votre cerveau

**Premiers résultats après 3 semaines – Equilibre durable en 6 mois.**

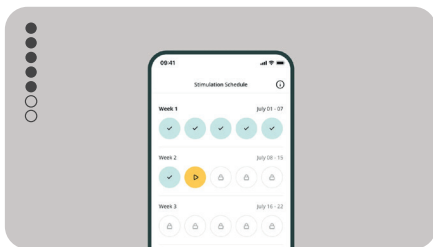

## **Phase d'activation (semaines 1 à 3)**

5x\* par semaine, pendant 3 semaines

## **Pourquoi un traitement de 6 mois ?**

Les améliorations apparaissent généralement après environ 3 semaines.

Cependant, les 6 à 12 premiers mois suivant le traitement sont essentiels pour prévenir les rechutes. Pendant cette période, le cerveau reste plus sensible aux schémas dépressifs. Un traitement continu avec Flow aide à stabiliser durablement l'humeur.




## **Phase de renforcement (semaines 4 à 10)**

2x\* par semaine, jusqu'à la fin du cycle de 10 semaines

*\* Une séance de stimulation Flow dure 30 minutes.*

*L'app contient des exercices complémentaires issus de la thérapie cognitive comportementale – ils peuvent renforcer l'effet du Flow.*

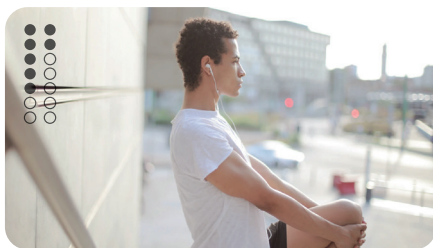

## **Phase d'entretien (à partir de la semaine 10)**

Après 10 semaines, vous pouvez soit réinitialiser le casque pour augmenter le nombre de séances par semaine, soit continuer 2x\* par semaine.



## Voici comment Flow aide votre cerveau

### Améliorations démontrées après 10 semaines

Des données du monde réel montrent une amélioration significative des symptômes après 10 semaines d'utilisation du Flow :

---

**Humeur :**

+37 %

---

**Joie de vivre :**

+32 %

---

**Concentration :**

+31 %

---

**Moins d'anxiété :**

+31 %

---

**Qualité du sommeil :**

+25 %

---

**Implication émotionnelle :**

+35 %



# Vous ne prenez aucun risque.

**Testez Flow tout simplement chez vous.**

**Chaque commande inclut automatiquement une période d'essai de 30 jours à peu de frais.**

Commandez le pack d'essai Flow pour CHF 98.-, comprenant les électrodes, la TVA et l'envoi. Après la commande, vous recevrez le casque Flow sous 1 à 3 jours ouvrables.

Commencez le traitement en téléchargeant l'application gratuite et testez Flow pendant 30 jours confortablement chez vous.

**Après 30 jours, vous décidez de:**

**Garder le Flow :** vous recevrez un e-mail avec un lien de paiement pour le solde de CHF 452.-. Le paiement par facture est également possible sur demande – il vous suffit de nous contacter.

**Retourner le Flow :** renvoyez le casque pendant la période d'essai et ne payez que les frais d'essai de CHF 98.-.



flowneurosciencesuisse

**FLOW Neuroscience c/o NEUROLITE AG**

Hühnerhubelstrasse 79  
3123 Belp  
Switzerland

T +41 (0)31 529 28 31  
flow@neurolite.ch  
[www.flowneuroscience.ch](http://www.flowneuroscience.ch)