

FLOW

NEUROSCIENCE

Die neue Ära der Depressions Behandlung

Keine chemischen Substanzen.
Keine Wartelisten.
Keine signifikanten Nebenwirkungen.

Flow – die personalisierte
Depressionsbehandlung für Sie Zuhause.

83%

stellen eine
Verbesserung fest

4/5

empfehlen
Flow

2000+

aktive Nutzer:innen
jeden Monat

NEUROLITE


Advanced Medical Solutions



So funktioniert Flow

Flow stützt sich auf einen erprobten Behandlungsplan, der auf einem Jahrzehnt der tDCS-Forschung basiert.

Das Protokoll ist in zwei Phasen unterteilt, die jeweils über einen eigenen Zweck und Ablauf verfügen:

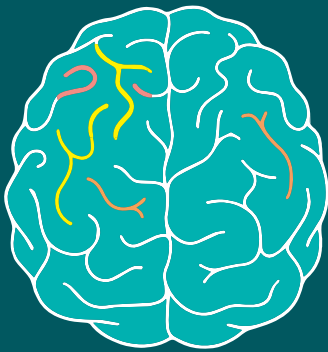

01

Aktivierungsphase

Wochen 1 – 3

- Stösst Behandlung an
- Umfasst 5 Stimulationen pro Woche
- Führt in die Verhaltenstherapie-Kurse ein
- Unterstützt die bessere Regulation von Stimmung, Schlaf und Konzentration



02

Intensivierungsphase

Ab Woche 4

- Verstärkt und erhält erreichte Ziele
- Umfasst 2 Stimulationen pro Woche
- Praktiken aus der App werden weiterhin umgesetzt
- Schützt den Behandlungserfolg und beugt zukünftigen Depressionsschüben vor


tDCS und Flow



Transkranielle Gleichstromstimulation, auch **tDCS** genannt, ist eine nicht-invasive Methode der Hirnstimulation.

Bei der **tDCS** werden neuronale Netzwerke durch eine schwache elektrische Stimulation aktiviert. Diese elektrische Stimulation regt die Gehirnaktivität an, was zu einer Verringerung depressiver Symptome führt.

tDCS wird schon seit Langem in Kliniken eingesetzt und kann nun dank Flow in einem medizinisch zertifizierten und handlichen Gerät zu Ihnen nach Hause kommen.

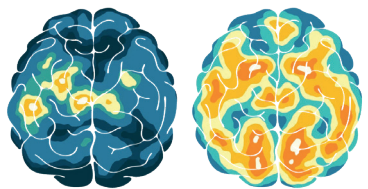

Flow und Ihr Verhalten

Die **kostenlose Flow-App für Depressionen** kombiniert Technologie und Verhaltenstherapie und bietet Ihnen einen neuen Zugang zum Verstehen und Behandeln Ihrer Depression.


Die App umfasst **über 50 virtuelle Therapiesitzungen**, die von lizenzierten Psycholog:innen entwickelt wurden.

Die App wird für die Steuerung des Flow tDCS-Headset benötigt.



Kurse für eine bessere psychische Gesundheit


Neben der Anwendung von Verhaltenstherapie-Methoden zeigt die App Ihnen, was Sie zu Hause unternehmen können, um Änderungen an Ihrem Lebensstil vorzunehmen und neue Gewohnheiten und Routinen einzüben, die eine Linderung Ihrer Depression unterstützen.

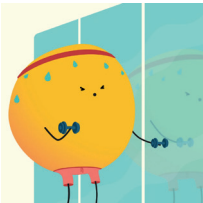


Bewegung



Meditation

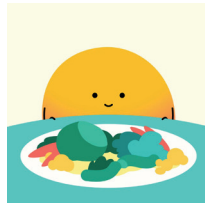

Ernährungsplan

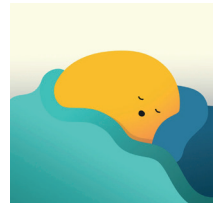

Schlafstrategien

Downloaden Sie die App für Ihr Smartphone

App Android



App IOS







Noch unsicher? Testen Sie Flow!

Für **CHF 98.-** (inkl. MwSt. und Versand) können Sie Flow während **30 Tagen** testen. Sie kaufen das Flow zum normalen Verkaufspreis von CHF 550.- (inkl. MwSt. und Versand)

Nach der Testperiode haben Sie folgende Optionen:

- Sie behalten das Flow und bezahlen die Rechnung à CHF 550.-
- Sie retournieren uns das Flow und wir stornieren die Originalrechnung und senden Ihnen eine neue Rechnung nur für die Testphase à CHF 98.-

FLOW Neuroscience
c/o NEUROLITE AG
Hühnerhubelstrasse 79
3123 Belp
Switzerland

T +41 (0)31 529 28 31
flow@neurolite.ch
www.flowneuroscience.ch



[flowneuroscienceswitzerland](https://www.instagram.com/flowneuroscienceswitzerland)