

	Handout	Erstellt: 07.02.2024/DV
		Bearbeitet:
	<b>Pflege - Systemhauben</b>	

## Lavage standard

Pour des raisons d'hygiène, les bonnets du système doivent être nettoyés régulièrement afin de garantir une longue durée de vie du matériau.

1. Tremper le bonnet dans de l'eau tiède avec du détergent Ivory pendant quelques minutes (20 au maximum), le connecteur étant éloigné de l'eau. Le connecteur du bonnet ne doit pas être mouillée.
2. Rincer le bonnet à l'eau courante douce, tiède, et enlever soigneusement tous les résidus de gel sur les disques métalliques des électrodes, après chaque dérivation, en utilisant par exemple une brosse ou une brosse à dents. En effet, ces résidus peuvent conduire à la formation d'une couche d'oxyde sur les électrodes, ce qui empêche d'obtenir de bons résultats de dérivation, en agissant comme un isolant et empêchent ainsi de bonnes résistances de contact.
3. Laissez sécher le bonnet sur un cintre. S'il n'y a pas assez de temps entre les différentes séances, il est également possible de les sécher avec un sèche-cheveux, mais celui-ci ne doit pas être utilisé à une température trop élevée, car cela affecte l'élasticité du matériau.

## Lavage désinfectant en cas de blessures à la tête ou de maladies contagieuses

Dans le cas d'un patient souffrant d'une maladie contagieuse ou de plaies ouvertes entrant en contact avec le bonnet, deux lavages sont nécessaires.

### Prélavage

1. Tremper le bonnet dans une solution enzymatique (en éloignant toujours le connecteur de l'eau) diluée selon les indications du flacon et pendant la durée indiquée dans le flacon (au moins 10 minutes). Dans la mesure du possible, ne le laissez pas tremper plus de 20 minutes, car cela pourrait entraîner une usure prématurée du matériau. Nous recommandons le Gigasept FF-NEU ou un produit équivalent. Le connecteur du bonnet ne doit pas être mouillée.

### Lavage

2. De la solution enzymatique, passez le bonnet à la solution d'eau tiède avec le détergent Ivory et suivez les mêmes étapes que pour le lavage standard, en faisant simplement plus attention au rinçage, afin d'éliminer tout résidu du détergent désinfectant.

Les bonnets ne peuvent pas être stérilisés à la vapeur.