

	Handout	Erstellt: 07.02.2024/DV
		Bearbeitet:
	<b>Pflege - Systemhauben</b>	

## Pulizia standard

Per motivi igienici, le cuffie del sistema devono essere lavate regolarmente per garantire una lunga durata del materiale.

1. Immergere la cuffia in acqua tiepida con il detergente Ivory per alcuni minuti (massimo 20), tenendo il connettore lontano dall'acqua. Il connettore della cuffia non deve bagnarsi.
2. Risciacquare la cuffia con acqua corrente tiepida e rimuovere con cura i residui di gel dai dischi metallici degli elettrodi, utilizzando ad esempio uno spazzolino da denti. Questi residui possono infatti portare alla formazione di uno strato di ossido sugli elettrodi, che impedisce di ottenere una buona qualità del segnale, agendo da isolante e impedendo così delle basse resistenze di contatto.
3. Lasciare asciugare la cuffia su un gancio. Se non c'è abbastanza tempo tra una sessione e l'altra, si possono asciugare anche con un asciugacapelli, che però non deve essere usato a una temperatura troppo alta, perché influirebbe sull'elasticità del materiale.

## Lavaggio disinfettante per ferite alla testa o malattie contagiose

Nel caso in cui un paziente affetto da una malattia contagiosa o che presenta ferite aperte venga a contatto con la cuffia, sono necessari due lavaggi per pulire bene la cuffia.

### Prelavaggio

1. Immergere la cuffia in una soluzione enzimatica (tenendo sempre il connettore lontano dall'acqua) diluita come indicato sul flacone e per il tempo indicato sul flacone (almeno 10 minuti). Se possibile, non tenerla immersa per più di 20 minuti, poiché ciò potrebbe causare un'usura prematura del materiale. Si consiglia Gigasept FF-NEU o un prodotto equivalente. Il connettore della cuffia non deve bagnarsi.

### Lavaggio

2. Dalla soluzione enzimatica, passare la cuffia in una soluzione di acqua tiepida con detergente Ivory e seguire gli stessi passaggi del lavaggio standard, prestando semplicemente maggiore attenzione al risciacquo, per rimuovere eventuali residui del detergente disinfettante.

Le cuffie non possono essere sterilizzate a vapore.